


## ProphyCups Snow &amp; Fire

رأسان مبتكران بشكل الكأس للمعالجة الوقائية من شركة PD, Produits Dentaires SA, Vevey, Switzerland

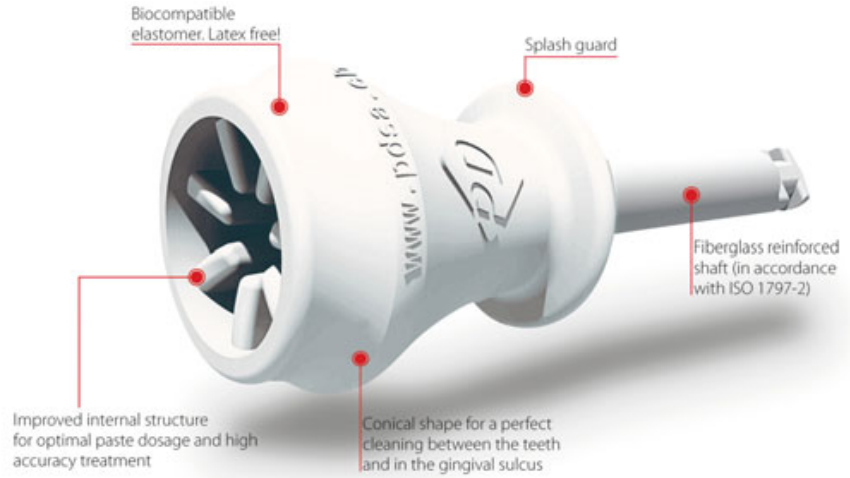

من المعادن إعادة معالجة هذه الرؤوس. نحن ننصح زملائنا من أطباء الأسنان بإستعمال رؤوس ProphyCups Snow & Fire لراحتهم وراحة المرضى، وكذلك كحل علاجي ذو فعالية متفوقة.



Philippe Métillon طبيب الأسنان



Mandy Jaunin مختصة النظافة

عيادة طب الأسنان Métillon  
Grand Rue 38, 1814 La Tour-de-Peilz,  
Switzerland

Produits Dentaires توفر في نفس الوقت المعالجة الفعالة إلى جانب راحة المريض. هذه الرؤوس المصممة بشكل إجازة تغير شكلها بسهولة بالضغط المنخفض، مما يسمح بتنظيف الأسنان وتلبيسها كما في حال استعمال الرأس الماص. ويكون التماس مع الأسنان بأفضل شكل ممكن، فالرأس الكوبي الشكل يمتص أي تغير في شكل السطح، والعمل به ممتع ومرح بالفعل. ويؤدي الضغط الخفيف اللازم هنا إلى شعور المريض براحة كبيرة خلال العمل. وصممت شفة الكأس التي يتغير شكلها عند حافة الرأس بحيث تسمح بالوصول بشكل أفضل إلى المناطق بين السنية وكذلك الثلمات اللثوية، مما يحسن من مواصفات الرؤوس ProphyCups Snow & Fire. ميزة منع التلوث مدمجة في تركيب المطاط الصناعي وتقلل إلى حد كبير من تآثر اللعاب دون تعريض المريض لأي خطر. المطاط الصناعي المقبول حيويًا خالي كلياً من اللاتكس، مما يلغي خطر التعرض للتحسس. ونحن نستعمل في عيادتنا فقط الرؤوس ProphyCups Snow من شركة PD المثالية للصقل اللطيف والتنظيف العادي وكذلك لإزالة اللويحات السنية. الرؤوس ProphyCups Fire معدة خصيصاً لإزالة البقع الكثيفة واللويحات السنية الصلبة. وأخيراً وليس آخراً فإن التصميم النبوذ لهذه المنتجات يسمح بتجنب كل مشاكل التنظيف والتعقيم، كما يسهل التركيب الخالي

هذه الرؤوس الوقائية ذات الشكل الإجاصي تغير شكلها نتيجة الضغط البسيط، مما يسمح بتنظيف وتغليظها بسهولة مماثلة للعمل بالرأس الماص.

يمكن أن تسبب المعالجة الوقائية نوعاً من التوتر والجهد لبعض الأشخاص. في حين من المهم لنا في عملنا اليومي أن يأتي المرضى إلينا بشعور من الثقة والهدوء. رؤوس المعالجة الوقائية ProphyCups Snow & Fire من شركة



درجتان مختلفتان من القساوة  
Snow (طرية) 49 ShA (حسب Shore)  
Fire (متوسطة) 59 ShA (حسب Shore)